

**Tristel Duo™**

**ULT**



Tristel Duo ULT je vysoce účinná dezinfekční pěna na bázi oxidu chloričitého. Má značku CE jako Třída IIb Medicínský přístroj v souladu s Evropskou směrnicí o medicínských přístrojích 93/42/EHS a změnami v 2007/47/ES.

## ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tristel Duo ULT je navržen speciálně pro vysoce účinnou dezinfekci endokavitálních ultrazvukových sond, jako jsou transrektální a transvaginální sondy. Další použití zahrnují vysoce účinnou dezinfekci neinvazivních medicínských přístrojů, jako jsou sondy k umístění na povrch kůže (včetně těch, které se používají při invazivních metodách), skenery močového měchýře a manžety na měření krevního tlaku.

## CHEMIE TRISTEL

Tristel Duo ULT je založen na chemické bázi oxidu chloričitého (ClO<sub>2</sub>) společností Tristel, dobře zdokumentovaném a vysoce efektivním biocidu. Tristel Duo ULT obsahuje dvě oddělené části, které obsahují roztok Tristel Base (kyselina citronová) a roztok Tristel Activator (chloritan sodný). Po smíchání pomocí stlačené pěnového čerpadla je vytvořeno chemické složení oxidu chloričitého společnosti Tristel. Tristel Duo ULT obsahuje neiontové činidlo pro větší čistící výkon.

## BIOCIDNÍ VÝKON

Tristel Duo ULT je sporocidní, mykobaktericidní, virucidní, fungicidní a baktericidní s dobou kontaktu 30 sekund. Výrobek byl důkladně testován podle všech příslušných evropských norem požadovaných pro dezinfekční prostředky používané v lékařské oblasti. Tristel Duo ULT je účinný proti mikroorganismům, jako jsou:

- Lidský papilomavirus (HPV)
- *Bacillus subtilis*
- *Mycobacterium terrae*
- Hepatitida B
- HIV
- Herpes simplex virus
- *Aspergillus brasiliensis*
- *Candida albicans*
- *Escherichia coli*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Staphylococcus aureus*
- *Gardnerella vaginalis*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Klebsiella pneumoniae* rezistentní na karbapenem (CRE)
- *Enterococcus faecium* rezistentní na vankomycin (VRE)
- *Staphylococcus aureus* rezistentní na meticilin (MRSA)

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Nepoužívejte v případě, že je láhev pěny poškozena.
- Vydezinfikujte si ruce a použijte vhodně osobní ochranné pomůcky při manipulaci s dezinfekčními

prostředky a medicínskými přístroji.

- Pokud se Tristel Duo ULT používá poprvé, stiskněte čerpadlo dva až čtyři krát pro jeho naplnění.
- Před dezinfekcí zdravotnické prostředky důkladně očistěte. Zbytková kontaminace organickými nečistotami sniží účinnost dezinfekčního prostředku. Dodržujte nemocniční protokol a pokyny výrobce zdravotnického prostředku.
- Pro profesionální použití.
- Tento návod k použití (NP) by se měl používat společně s etiketou výrobku, bezpečnostním listem (BL) a pokyny výrobce přístroje.

### Krok 1

Naneste dva alikvotní díly přípravku Tristel Duo na suchý ubrousek (doporučujeme Duo Wipes).

### Krok 2


Ubrouskem rozetřete pěnu na povrchu sondy a zajistěte, aby byly pokryty všechny oblasti. Nepřetržitě utírání povrchu není nutné a mělo by se mu zabránit, aby nedošlo k rychlému opotřebení utěrky. Pokud je to nutné, použijte vatový tampon na rozetření pěny do zářezů.

*Poznámka: Použité ubrousky zlikvidujte v souladu s místními předpisy.*

### Krok 3

Nechte povrch zaschnout, aby byla zajištěna minimální doba kontaktu 30 sekund.

*Poznámka: Uskladněte medicínský přístroj v souladu s nemocničními protokoly, aby nedošlo k poškození nebo opětovné kontaminaci.*

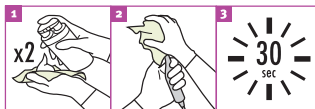

### Varování

#### Báze

Způsobuje vážné podráždění očí.

#### Pokyny pro bezpečné zacházení

#### Báze

Používejte ochranné brýle.

**PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou.



**Výrobce:** Tristel Solutions Ltd

**Distributor:** Tristel GmbH, Karl-Marx-Allee 90A 10243 Berlin, Deutschland  
T +49 (0)30 54844226  
E vertrieb@tristel.com

Pro patentové informace společnosti Tristel navštivte: [www.our-patents.info/tristel](http://www.our-patents.info/tristel)

Kontaktujte společnost Tristel, Vašeho místního distributora nebo navštivte [www.tristel.com](http://www.tristel.com) a získejte podpůrné dokumenty, jako listy bezpečnostních údajů, údaje a zprávy z mikrobiologických testů.

# Tristel™

WE HAVE CHEMISTRY.



**Tristel Solutions Ltd**, Lynx Business Park,  
Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY, UK  
+44 (0)1638 721500 - mail@tristel.com - www.tristel.com



Tristel NV, Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerp, Belgium

