

Dezinfekce vyššího stupně (sterilizace za studena) určená pro všechny části ultrazvukového přístroje včetně ultrazvukových sond

Tristel Duo™
ULT

Tristel Duo ULT je vysoce účinná dezinfekční pěna na bázi oxidu chloričitého. Používá se zejména k dezinfekci endokavitálních a transabdominálních ultrazvukových sond. Tristel Duo ULT lze také použít k dezinfekci transkutánních sond (včetně sond pro invazivní procedury), držáků sond, kabelů, klávesnic, monitorů, dotykových panelů a zařízení, která kombinují ultrazvukovou sondu s mobilním zařízením.



Duo Wipes

- Suché utěrky pro použití s Tristel Duo ULT
- 100% polypropylen
- 200 utěrek / balení



Tristel Duo ULT

- 125 ml roztoku Tristel Base (kyselina citrónová) + 125 ml roztoku aktivátoru Tristel (chloritan sodný)
- Při spojení obou složek dojde k chemické reakci a vytvoření pěny s obsahem oxidu chloričitého (ClO₂)
- 310 dávek


Použití



Aplikujte dvě dávky Tristel Duo ULT na jeden Duo Wipe



Rozetřete pěnu na celém povrchu sondy

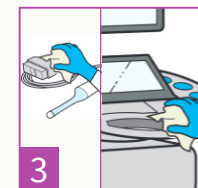

Desinfikujte dotykový panel, klávesnici, kabely, konektory, atd.



Nechte povrch zaschnout tak, aby byla zajištěna minimální doba kontaktu 30 sekund

Tristel Duo ULT má prokázaný sporicidní, baktericidní, virucidní (vč. SARS-CoV-2) a fungicidní účinek.

nimotech
www.nimotech.cz | Tel.: +420 549 246 688
e-mail: nimotech@nimotech.cz